


Протокол фиксации СВШ **EasyPost** на **Calibra Universal*** (самоадгезивная техника) + настройка культи **Prime&Bond universal + SDR Plus**


1. Освежите ткани коронковой части зуба перед процедурой



2. Распломбируйте канал на необходимую глубину

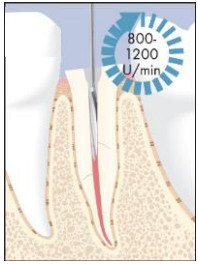


3. Проведите примерку СВШ EasyPost в к/к

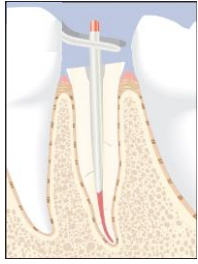


4. Обрежьте штифт до нужного уровня




5. Протравите канал и поверхность зуба **ОПЦИОНАЛЬНО!**

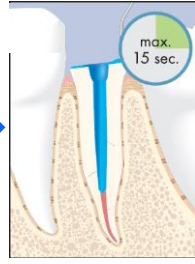


6. Промойте в течение 15сек струей воды

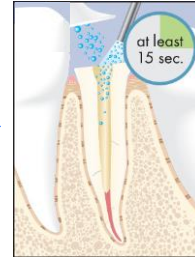


7. Просушите поверхность воздухом из пюстера

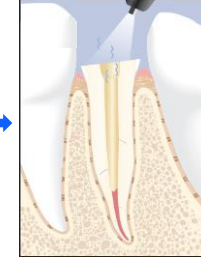


8. Просушите канал бумажным штифтом

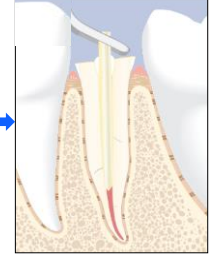


9. Внесите в канал цемент Calibra Universal **БЕЗ АДГЕЗИВА²**

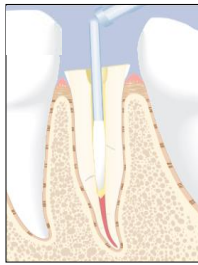


10. Установите в канал СВШ **EasyPost**. Удалите излишки цемента брашем.

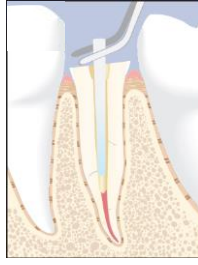

11. Удерживайте штифт **40-60сек** с легким нажимом для химической реакции полимеризации цемента

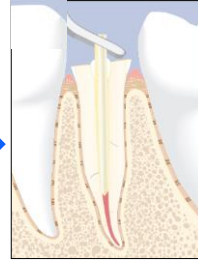

12. Полимеризуйте в течение **20 сек**

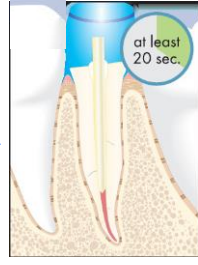


13. Избыток цемента в коронковой части удалите бором на небольшой скорости³




14. Протравите эмаль и дентин коронковой части в течение **15-30 сек**




15. Тщательно промойте струей воды

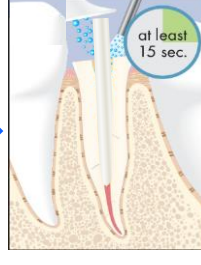


16. Просушите поверхность воздухом из пюстера

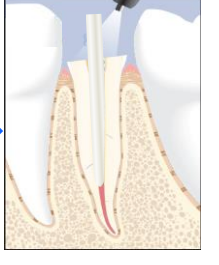


17. Нанесите адгезив **Prime&Bond universal** легко втирая в теч **20 сек**

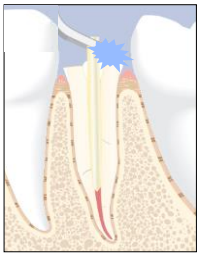


18. Для испарения растворителя раздуйте в теч. не менее **5 сек**

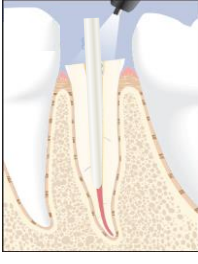


19. Полимеризуйте адгезив в течение **20 сек⁴**

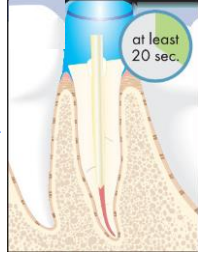


20. Восстановите культи зуба материалом **SDR Plus** (1 порция до 4мм)

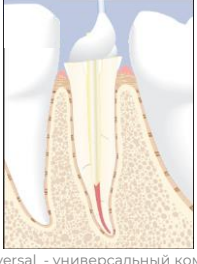


21. Полимеризуйте каждую порцию в течение **20 сек⁵**

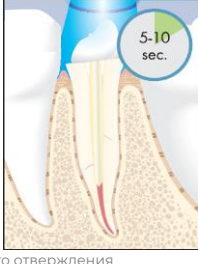

22. Отпрепарируйте и отполируйте поверхность

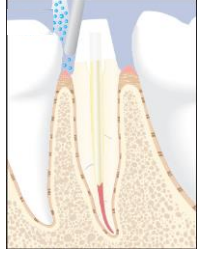

23. Готовый результат

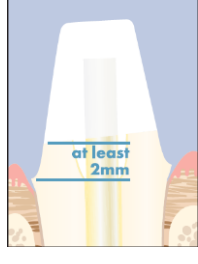

* Calibra Universal - универсальный композитный цемент двойного отверждения

¹ При фиксации СВШ на самоадгезивный цемент протравливание канала не требуется, а является опциональным

⁴ 10 сек при использовании лампы SmartLite Focus

² цемент Calibra Universal имеет самоадгезивные свойства, поэтому использование адгезива не требуется.

³ Пескоструйная обработка опциональна

⁵ 20 сек для универсального оттенка. 40 сек для A1-A3

