




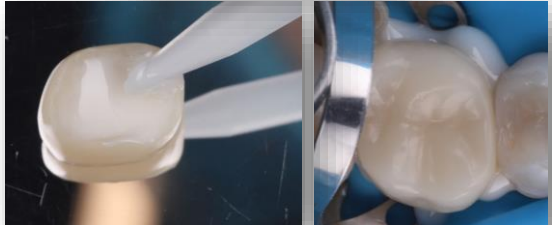


Подготовка и фиксация стеклокерамики (Celtra® Duo)

| Этап | Celtra Duo (стеклокерамика) | |
|--|---|---|
| Примерка | <ul style="list-style-type: none"> • Припасуйте коронку • Выберите оттенок цемента • Очистите внутреннюю поверхность коронки спиртом • Зуб очистите, промойте, высушите поверхность* <p>*Пескоструйная обработка поверхности Al₂O₃ 27мкм опциональна</p> |  <p>Вкладка Накладка Коронки</p> |
| Предварительная обработка реставрации | <p>Используйте плавиковую кислоту (только на внутренней поверхности не прямой реставрации)</p> |  |
| Праймер | <p>Используйте силан в качестве связующего звена (только на внутренней поверхности не прямой реставрации) раздуйте, высушите поверхность. НЕ полимеризовать.</p> |  |
| Адгезивная подготовка | <ul style="list-style-type: none"> • Протравите зуб, промойте, просушите • Нанесите Prime&Bond universal (только на зуб) (если толщина реставрации >2,5 мм, то адгезив предварительно необходимо полимеризовать) • ВНИМАНИЕ!!! SCA НЕ требует!!! |  |
| Фиксация | <ul style="list-style-type: none"> • Используйте Calibra Universal в адгезивной технике (с Prime&Bond universal) • Полимеризация (светом при толщине <2,5мм; самополимеризация при толщине >2,5мм) • Для удаления излишков цемента проведите предварительную кратковременную полимеризацию светом по 3 сек с каждой стороны  |  |